


CT-6 Traction Splint

Gebruiksaanwijzing:

- 1) Maak splint op lengte. Top ter hoogte van bekkenkam. Onderkant +/- 20cm onder de voet.



- 2) Fixeer bovenzijde splint met liesband

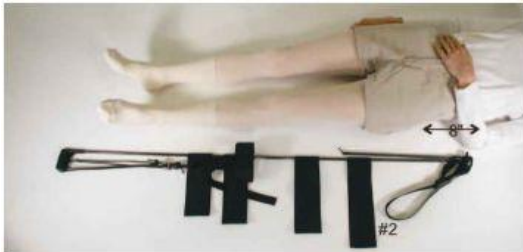

- 3) Fixeer onderzijde splint aan voet



- 4) Leg fixatie stroken aan: 2 boven en 2 onder de knie. Check circulatie. Oefen tractie uit zodanig dat de pijn minder wordt. Lengte vergelijkbaar met de lengte van het gezonde been. Check opnieuw pulsatie.



Product-details:

- Gefabriceerd van carbon.
- Efficiënt en gemakkelijk te verstellen.
- De CT-6 is geschikt voor zowel kinderen als voor volwassenen.
- Gemaakt in de USA, CE gecertificeerd.
- De splint is klein, licht en dus gemakkelijk aan de bestaande uitrusting toe te voegen.

Afmetingen en gewicht:

- Gewicht: 600 grams
- 30cm x 13cm x 10cm (afmeting in tas)



*De tourniquet is ter illustratie van de afmeting van de CT6 tractie splint

